

SYSTÈME POUR GUIDON DÉPLAÇANT

RÉFÉRENCES :

SYSSEO / SYSSEOX / SYSSEOXL



Fruit de la recherche Alter Eco Santé, le système ISSEO®, associé aux guidons AÏGO® et VERSO®, participe à la verticalisation active du patient.

Le système ISSEO® permet au soignant d'accompagner de façon ergonomique la verticalisation de la personne et de la sécuriser avant et pendant le transfert.

Le dispositif est ajustable à la taille grâce à la ceinture ARTUR® et s'accroche sur le guidon par l'échelle VERTIGRAD®. L'aidant peut par exemple déplacer le patient et l'installer aux toilettes.

Sinon, en remontant la partie basse de la ceinture sur la partie haute, le déshabillage et l'accès au siège sont grandement facilités pour un change debout ■

LES + PRODUIT

Les graduations colorées de l'échelle VERTIGRAD® permettent de codifier, **intra-équipe, la verticalisation.**

La ceinture ARTUR® permet un **déshabillage ainsi qu'un accès au siège des toilettes** en position debout.

Les boucles situées de part et d'autre de la ceinture **permettent de stabiliser latéralement le patient.**

Sa face interne antidérapante est un élément supplémentaire de sécurité.



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE
ALTER ECO SANTÉ



TAILLES

Existe en différentes tailles :
• ISSEO • ISSEO XS • ISSEO XL

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 



VOTRE CONSEILLER

FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Taille
SYSSEO N° Identification UDI : 03760311370151	Système ISSEO® pour guidon déplaçant AÏGO®. Composé de la ceinture ARTUR® et de l'échelle VERTIGRAD®.	Taille 38/58
SYSSEOXS N° Identification UDI : 03760311370137	Système ISSEO® XS pour guidon déplaçant enfant et adulte de petite taille. Composé de la ceinture ARTUR® XS et de l'échelle VERTIGRAD® XS.	Taille 4 ans/16 ans
SYSSEOXL N° Identification UDI : 03760311370144	Système ISSEO® XL pour guidon déplaçant AÏGO®. Composé de la ceinture ARTUR®, du kit extension XL et de l'échelle VERTIGRAD®.	Taille 60/80
ZRALSYSNC N° Identification UDI : 03760311371875	Kit extension XL pour système ISSEO® comprenant rallonge tour de taille et échelle VERTIGRAD® XL.	Taille 60/80
SITUR N° Identification UDI : 03760311370212	Ceinture de transfert ARTUR®	Taille 38/58
SIGRAD N° Identification UDI : 03760311371691	Echelle VERTIGRAD® pour système ISSEO®	Taille Unique

PRODUIT :	ISSEO®
DESCRIPTION COURTE :	SYSTÈME POUR GUIDON DÉPLAÇANT
RÉFÉRENCES :	SYSSEO / SYSSEOXS / SYSSEOXL
DATE DE MISE À JOUR :	17/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	550 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE-ALPES AUVERGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne, pour accompagner et sécuriser la verticalisation d'un sujet présentant une incapacité de verticalisation manuelle. Indiqué pour une utilisation en complément d'un guidon de transfert déplaçant.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas laisser un patient équipé de la ceinture ISSEO® seul.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel, produits abrasifs et assouplissant Produit recommandé : Détergent désinfectant. Le procédé de lavage suivant doit être utilisé : <ul style="list-style-type: none"> • Lavage à 60° maximum en machine. • Séchage en machine à faible température avec programme linge délicat. • Ne pas repasser. • Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Polypropylène, acier nickelé, nylon enduction PVC, polyester, polyester enduction PVC, jersey polyester enduction PVC.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant 1 ceinture ARTUR®, 1 échelle VERTIGRAD® et sa fiche technique.
COULEUR :	Noir, vert anis et gris.