

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION

"GUIDON DE TRANSFERT DÉPLAÇANT"

RÉFÉRENCES :

SIGO EVOL (AÏGO SEUL) / SYGOSSEO (AÏGO +ISSEO)
SIGO EVOL ADL / SIGO EVOL AM / SYGOSSEO ADL / SYGOSSEO AM



Le guidon AÏGO® est un appareil d'aide à la verticalisation et au transfert pour les personnes ayant des difficultés motrices des membres inférieurs.

Grâce à sa base solide d'un guidon de maintien et d'appuis tibiaux réglables et inclinables, il permet de réaliser rapidement des transferts « assis-debout-assis » en toute sécurité avec l'aide d'un aidant.

Equipé de roulettes permettant un roulage de qualité sur toutes les surfaces, AÏGO® permet de limiter les transferts en allant aisément de la chambre à la salle de bain sans étape intermédiaire.

Grâce à son design étudié pour reproduire le schéma moteur naturel, AÏGO® améliore la verticalisation des patients et participe ainsi à la rééducation lors de chaque transfert.

Livré avec la sangle dorso lombaire SANGO® ■


LES + PRODUIT

Grande stabilité grâce au cadre englobant d'AÏGO® réglable en hauteur.

Confort optimisé avec les appuis brachiaux.

Freinage du guidon centralisé par une pédale ergonomique.

Entraxe des roues optimisé pour s'insérer sous n'importe quel fauteuil roulant.

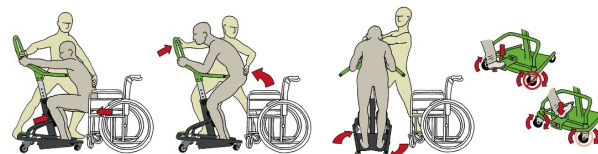

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



SYGOSSEO : Aigo équipé du système ISSEO® (réf SYSSSEO) pour accompagner et sécuriser la verticalisation.

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
Réf SIGO EVOL ADL / SYGOSSEO ADL :
Aigo équipé d'appuis tibiaux demi-lune (réf SYSLUNAPPUI)



Réf SIGO EVOL AM / SYGOSSEO AM :
Aigo équipé d'un appui tibial moustache (réf SYSMOUSTAPPUI)




VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

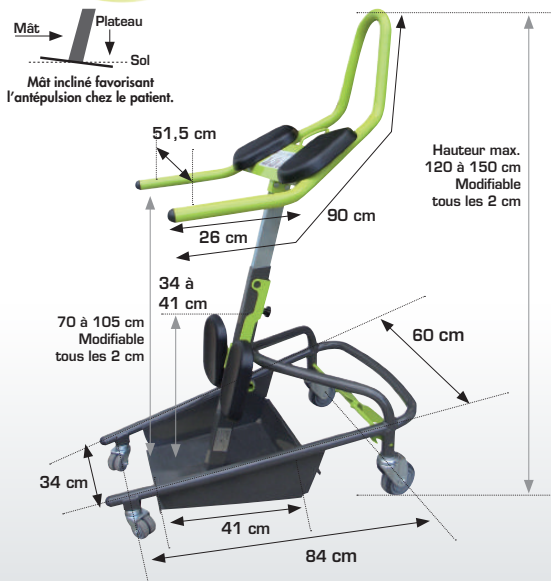

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :	AÏGO®
DESCRIPTION COURTE :	GUIDON DE TRANSFERT DÉPLAÇANT
RÉFÉRENCES :	SIGO EVOL (AÏGO SEUL) / SYGOSSEO (AÏGO + ISSEED) SIGO EVOL ADL / SIGO EVOL AM SYGOSSEO ADL / SYGOSSEO AM
DATE DE MISE À JOUR :	16/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	3
POIDS :	23 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE-ALPES AUVERGNE

Réf	N° Identification UDI
SIGO EVOL	03760311370304
SIGO EVOL ADL	03760311370298
SIGO EVOL AM	03760311370281

Réf	N° Identification UDI
SYGOSSEO	03760311370182
SYGOSSEO ADL	03760311370175
SYGOSSEO AM	03760311370168

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :

Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux positions assises, d'un sujet présentant une incapacité de verticalisation autonome. Indiqué pour les sujets présentant une faiblesse musculaire modérée des membres inférieurs, possédant du tonus musculaire dans au moins un membre supérieur, ayant une tenue du tronc et une capacité à comprendre les consignes simples.
Les freins doivent être actionnés lors de la verticalisation du patient et lors de sa descente du guidon. Procéder à un réglage de freins à intervalles réguliers.
Veiller à bien serrer au maximum les molettes de réglages en hauteur.

CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :

Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
Ne pas laisser un patient seul sur le guidon Aïgo®.
Ne pas utiliser les appuis brachiaux comme prise.
Ne pas utiliser sous la douche.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN :

LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.
Produits prohibés : Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs.
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.
Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
Le guidon AÏGO® est équipé de roulettes avec bandages de gomme tendre qui garantissent la stabilité pour les déplacements à vide.
Elles nécessitent un contrôle d'usure régulier afin d'en maintenir l'efficacité.
En cas d'abrasion importante, de déformation, bris, etc, procéder à leur échange.

STOCKAGE :

Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).

PIÈCES D'USURES :

Appui tibiaux et appuis brachiaux, roulettes.

COMPOSITION :

Acier, peinture epoxy, mousse polyuréthane, PVC, nylon.

CONDITIONNEMENT :

1 carton contenant 1 guidon de transfert AÏGO®, la sangle SANGO®, sa fiche technique et sa notice de montage.

COULEUR :

Vert anis.