

COUSSIN DE REHAUSSEMENT UNIDIRECTIONNEL - DOMICILE

RÉFÉRENCE : SIPM2070

Le coussin de rehaussement unidirectionnel ALPHAWAY® est conçu pour l'installation et le maintien du patient assis au fauteuil.

Ce coussin glisse à sens unique, mais agit en deux temps.

Lors de l'installation, ALPHAWAY® coulisse avec la personne vers le fond de l'assise, puis l'empêche de glisser vers l'avant.

Ainsi le maintien en position physiologique est facilité, l'affaissement dans le fauteuil est évité.

Il peut être utilisé sur des coussins de prévention d'escarres ■



LES PRODUIT

Offre un réel confort au patient grâce au revêtement velours.

Permet à l'aidant de rehausser le patient sans effort.

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
Empêche la glisse passive vers l'avant.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	ALPHAWAY®
DESCRIPTION COURTE :	COUSSIN DE REHAUSSEMENT UNIDIRECTIONNEL DOMICILE
RÉFÉRENCE :	SIPM2070
DATE DE MISE À JOUR :	21/03/2022
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	04250355320704
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	440 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	PETERMANN GMBH
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Indiqué pour les sujets présentant des difficultés de rehaussement en position assise et sujet à un affaissement dans le fauteuil.</p> <p>Lors de l'installation sur l'assise, la flèche doit être visible et en direction du dossier.</p> <p>Considérant que le patient ne s'assoit pas directement au fond de l'assise, placer le coussin ALPHAWAY® à 10 cm du bas du dossier de manière à ce qu'une fois le rehaussement effectué, le patient et le coussin ALPHAWAY® occupent la totalité de l'assise.</p> <p>Peut-être positionné sur des coussins préventifs mais pas sur des coussins curatifs pour les escarres.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage – désinfection et de comptabilité tissus » mis au point par la société ANIOS.</p> <p>Produits prohibés : Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :</p> <p>Lavage à 60° en machine.</p> <p>Séchage à basse température 45-50° maximum.</p>
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+5°C / +40°C).
COMPOSITION :	Coton, sans latex.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant le coussin de rehaussement unidirectionnel ALPHAWAY® et sa fiche technique.
COULEUR :	Gris et rouge.
DIMENSIONS :	50 x 45 cm