

APPUIS TIBIAUX

POUR GUIDONS DE TRANSFERT AÏGO® ET GIRO®

RÉFÉRENCES: SYSMOUSTAPPUI / SYSLUNAPPUI

Iter Eco Santé fait évoluer ses produits pour toujours répondre aux besoins des utilisateurs.

Ainsi, deux appuis tibiaux, adaptables sur les guidons de transfert AÏGO® et GIRO®, ont été conçus pour personnes toujours accompagner au mieux les présentant une incapacité de verticalisation autonome.

L'appui demi lune assure un appui confortable et un maintien optimal grâce à sa forme englobante.

L'appui monobloc moustache permet quant à lui une verticalisation sécurisée en verrouillant les jambes de la personne afin d'éviter l'abduction ou l'adduction



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAINE ALTER ECO SANTÉ





VOTRE CONSEILLER





La diversité des appuis permet de s'adapter à toutes les pathologies et morphologies.

Inclinables, ils accompagnent les mouvements du patient pendant la verticalisation.

Les appuis tibiaux peuvent être :

- · Montés sur structure : l'utilisateur change le système d'appui sur le guidon (temps <2 min)
- Sur le guidon choisi (références : SIRO AM / SIGO EVOL AM / SYGOSSEO AM / SIGO EVOL ADL / SYGOSSEO ADL) : prêts à l'emploi

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE - FRANCE TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK





APPUIS TIBIAUX





Références	Désignations	Poids	Dimensions
SYSMOUSTAPPUI N° Identification UDI : 03760311371615	Système complet Appui Tibial monobloc MOUSTACHE® pour échange sur références SIGO EVOL, SYGOSSEO et SIRO.	1,5 kg	44 x 17 x 9,5 cm
SYSLUNAPPUI N° Identification UDI : 03760311371622	Système complet Appui Tibial 2 demi lune pour échange sur références SIGO EVOL et SYGOSSEO.	2,1 kg	37 x 36 x 11 cm

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT:	APPUIS TIBIAUX
DESCRIPTION COURTE :	POUR GUIDONS DE TRANSFERT AÏGO ET GIRO
RÉFÉRENCES :	SYSMOUSTAPPUI / SYSLUNAPPUI
DATE DE MISE À JOUR :	22/02/2019
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE*:	2 ANS
N° DIDENTIFICATION UDI :	CF TABLEAU RÉFÉRENCES
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS:	CF TABLEAU RÉFÉRENCES
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

^{*} Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Les appuis servent à accompagner la verticalisation avec un guidon de transfert. Vérifier le serrage du dispositif sur le guidon de transfert avant toute utilisation.	
CONTRE-INDICATIONS et sécurité :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas exercer de force dans un sens jugé non conforme à l'utilisation du produit.	
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.	
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température ($+10^{\circ}$ C / $+30^{\circ}$ C).	
COMPOSITION :	Support métallique : Acier S235, peinture époxy, inox. Appui demi lune : mousse polyuréthane, revêtement PU. Appui moustache : XPE.	
CONDITIONNEMENT :	enveloppe Craft contenant l'appui monté sur le support métallique et sa fiche technique. Les appuis uvent également être livrés directement montés sur le guidon.	
COULEUR :	Noir.	