

PLANCHE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCE
SIECA622000



La planche de transfert BANANA® est composée d'une surface lisse et glissante et d'une base antidérapante.

Positionnée entre deux plans assis, elle permet à l'utilisateur de glisser, d'une assise à l'autre, de façon autonome ou accompagnée.

On peut aussi l'utiliser pour les transferts voiture, toilette, bain, et pour la rééducation.

Sa forme courbée permet de faciliter les transferts en fauteuil roulant.

Pour s'adapter à toutes les situations, la gamme "Planche de transfert" est composée de 7 modèles différents par la forme et les dimensions ■

LES PRODUIT

Forme courbée ergonomique.

Plots antidérapants sous la planche.

Poignée ergonomique.

OPTIONS

GERIA-MAX



OLIVIA



MULTIGLIDE



Peut être associée avec une sangle de transfert GERIA-MAX® ou OLIVIA® ou avec un drap MULTIGLIDE® pour les transferts de personnes nues.

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


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	BANANA®
DESCRIPTION COURTE :	PLANCHE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIECA622000
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	1,5 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG À UNE DISTANCE < À 30 CM 150 KG À UNE DISTANCE < À 20 CM
FABRICANT :	SAMARIT
ORIGINE :	SUISSE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour un transfert seul ou aidé.</p> <p>En zone humide, vérifier l'adhérence.</p> <p>Pour un transfert assisté, évaluer si l'usage de ce produit est adapté à l'aidé.</p> <p>Vérifier que la planche est bien en appui stable des deux côtés et que les freins des plans de départ et d'arrivée, s'ils en possèdent, sont verrouillés.</p> <p>Avant le transfert, s'assurer que l'aidé n'a pas la peau pincée par la planche.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Après utilisation, la planche BANANA® ne doit pas rester sur le sol.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS</p> <p>Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, Séchage à l'air).</p>
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Polyéthylène haute densité.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant la planche BANANA® et sa fiche technique.
DIMENSIONS :	68 x 21 x 0,5 cm
COULEUR :	Jaune.