



PLANCHE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCE
SIECA622100NC

La planche de transfert BIGGEST® est composée d'une surface lisse et glissante mais également de deux zones antidérapantes sous la planche.

Positionnée entre deux plans assis, elle permet au patient de glisser, d'une assise à l'autre, de façon autonome ou accompagnée.

La taille importante de la planche de transfert BIGGEST® permet à tout utilisateur de réaliser un transfert avec dénivelé en toute sécurité.

On peut aussi l'utiliser pour les transferts fauteuil-voiture, fauteuil-toilettes, bain, rééducation.

Pour s'adapter à toutes les situations, la gamme "Planche de transfert" est composée de 7 modèles différents par la forme et les dimensions ■

LES + PRODUIT

Très grande surface de glisse.

Poignée ergonomique.

2 zones antidérapantes sous la planche.

OPTIONS

GERIA-MAX



Option : Peut être associée avec une sangle de transfert GERIA-MAX® ou OLIVIA® ou avec un carré de glisse SIIM60 pour améliorer la glisse latérale et limiter les efforts de poussée.

OLIVIA



SIIM60

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


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK



FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :	BIGGEST®
DESCRIPTION COURTE :	PLANCHE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIECA622 100NC
DATE DE MISE À JOUR :	14/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	3
POIDS :	2,9 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG À UNE DISTANCE < À 30 CM 150 KG À UNE DISTANCE < À 20 CM
FABRICANT :	SAMARIT
ORIGINE :	SUISSE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Doit être utilisée entre deux plans assis, pour un sujet présentant des difficultés de verticalisation, pour un transfert seul ou aidé.</p> <p>En zone humide, vérifier l'adhérence.</p> <p>Pour un transfert assisté, évaluer si l'usage de ce produit est adapté à l'utilisateur.</p> <p>Positionner le plan de départ à un angle de 30 °/ 40 ° par rapport au plan d'arrivée. Les bandes antidérapantes doivent reposer fermement sur le plan d'arrivée. Les bandes antidérapantes doivent être séchées avant d'être utilisées. Assurez-vous que les freins des plans de départ et d'arrivée, s'ils en possèdent, sont verrouillés (lit, fauteuil roulant, etc).</p> <p>Avant le transfert, s'assurer que l'utilisateur n'a pas la peau pincée par la planche.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Après utilisation, la planche BIGGEST® ne doit pas rester sur le sol.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits interdits : Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (Essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air). Nettoyage possible à l'eau savonneuse, sans utiliser de jet sous pression.</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Polyéthylène haute densité.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 carton contenant la planche BIGGEST ® et sa fiche technique.</p>
DIMENSIONS :	<p>102 x 23 x 1 cm</p>
COULEUR :	<p>Jaune.</p>