

## ETUDE CLINIQUE COMPARATIVE

(...) UNE ÉTUDE COMPARANT L'EFFICACITÉ DE LA POTENCE D'AIDE MALADE ET LA BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT ALTER ECO SANTÉ, A ÉTÉ MENÉE AUPRÈS D'UNE POPULATION DE PERSONNES ÂGÉES HOSPITALISÉES EN SERVICE DE RÉADAPTATION AU CHU DE NÎMES. (...) 76.5% DES PATIENTS ONT RÉUSSI À S'ASSEOIR AU MOINS D'UN CÔTÉ DU LIT EN UTILISANT LA BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT, CONTRE 21.5% AVEC LA POTENCE AIDE-MALADE. L'ANALYSE QUALITATIVE DU MOUVEMENT A MONTRÉ DES DÉGRADATIONS DES SCHÉMAS MOTEURS LIÉS À L'UTILISATION DE LA POTENCE AIDE-MALADE, EN PARTICULIER L'APPARITION DE DÉSÉQUILIBRES POSTÉRIEURS AINSI QUE LA DIMINUTION DE LA ROTATION LATÉRALES LIÉE AU MOUVEMENT NATUREL. L'UTILISATION DE LA BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT A MONTRÉ UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SCHÉMAS MOTEURS, LA POSITION EXCENTRÉE DE LA PRÉHENSION DE L'AIDE TECHNIQUE FAVORISANT LE MOUVEMENT NATUREL DE REDRESSEMENT ROTATION DU TRONC.

(ÉTUDE DISPONIBLE SUR DEMANDE)

## LES + PRODUIT

### Transfert autonome actif.

La gamme CANOLI® s'adapte à **tous les types de lits** quelles que soient la largeur et la hauteur du matelas.

Permet au patient de **réactiver son schéma moteur naturel**.

**Soulage l'aidant** d'un effort.

### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE - FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT

### RÉFÉRENCES :

DEBARLI90 / DEBARCOUL90 / DEBARCOUL90.02  
 DEBARLI140 / DEBARCOUL140 / DEBARCOUL140.02  
 DEBARLI200 / DEBARCOUL200 / DEBARCOUL200.02  
 DEHAUBAR90 / DEHAUBAR140 / DEHAUBAR200 / DEBARLIDOU  
 DEBARCLIDOU / DECLIBAR90 / DECLIBAR140 / DECLIBAR200 / DEBARSAC

La barre latérale de redressement CANOLI® permet le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit, tout en respectant le schéma moteur naturel, sans l'aide d'une tierce personne.

La barre CANOLI® se positionne à droite ou à gauche, sur tous types de lit. Elle cohabite parfaitement avec les barrières de lit et les fonctionnalités d'un relèvement buste.

Elle répond aux exigences réglementaires en assurant la protection des patients les plus fragiles (recommandation ANSM sur l'utilisation des barrières de lit du 31/01/2006) ■



© NFCA Pictures



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



Consulter notre **vidéo d'installation de la CANOLI®** - Disponible sur YouTube

**Notice d'installation également disponible sur notre site internet : [www.alterecosante.net](http://www.alterecosante.net)**

Les kits d'attaches de la CANOLI® sont des pièces d'usure, disponibles en pièces détachées :

- **ZSANVELNC** : Kit sangles Velcro et accroches pour CANOLI® réf 90

- **ZDEBARKIT140NC** : Kit sangles pour CANOLI® ref140

## FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimen- sions	Poids	Charge max.	Couleur
DEBARLI90	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit médicalisé. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DEBAR-COUL90	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit médicalisé. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Fuchsia
DEBAR-COUL90.02	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit médicalisé. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Bleu
DEBARLI140	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 140 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DEBAR-COUL140	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 140 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Fuchsia
DEBAR-COUL140.02	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 140 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Bleu
DEBARLI200	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 200 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DEBAR-COUL200	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 200 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Fuchsia
DEBAR-COUL200.02	Barre latérale de redressement CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 200 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Bleu
DEHAUBAR90	Barre haute CANOLI® pour lit médicalisé avec surmatelas. Système sécurisé.	68 x 42 x 42 cm	2,55 kg	150 kg	Blanc
DEHAU-BAR140	Barre haute CANOLI® pour lit traditionnel avec surmatelas, largeur maxi 140 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 42 cm	2,55 kg	150 kg	Blanc
DEHAU-BAR200	Barre haute CANOLI® pour lit traditionnel avec surmatelas, largeur maxi 200 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 42 cm	2,55 kg	150 kg	Blanc
DEBARLIDOU	Barre double CANOLI® pour lit médicalisé, réglable en largeur de 90 à 120 cm. Système sécurisé.	93 à 123 x 42 x 32 cm	2,55 kg	150 kg	Blanc
DEBARCLI-DOU	Barre double et escamotable CANOLI® pour lit médicalisé. Système sécurisé.	92 x 42 x 32 cm	2,55 kg	150 kg	Blanc
DECLIBAR90	Barre escamotable CANOLI® pour lit médicalisé. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DECLIBAR140	Barre escamotable CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 140 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DECLIBAR200	Barre escamotable CANOLI® pour lit traditionnel, largeur maxi 200 cm. Système sécurisé.	68 x 42 x 32 cm	2,35 kg	150 kg	Blanc
DEBARSAC	Vide poche adaptable sur CANOLI®. Composé de deux poches. Fixation par velcro à la barre intermédiaire de sécurité. En coton d'Égypte, lavable à 60°C.	18,5 x 25 cm	Non Appli- cable	Non Appli- cable	Rouge

ZSANVELNC : Kit de fixation Sangles VELCRO et accroches pour CANOLI ref 90

ZDEBARKIT140NC : Kit de fixation Sangles pour CANOLI ref 140

PRODUIT :	CANOLI®
DESCRIPTION COURTE :	BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT
DATE DE MISE À JOUR :	13/10/2023
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	4
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET OCCITANIE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

<b>INDICATIONS D'UTILISATION :</b>	Utilisation par un sujet, pour le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit, sans l'aide physique d'une tierce personne. L'utilisateur peut être guidé par une tierce personne. Indiquée pour les sujets atteints de régression psychomotrice, hémiplegiques ou atteints de paralysie. La barre doit être solidaire du relèvement buste s'il existe. La barre doit être positionnée sur le tiers supérieur du lit. L'installation des barres de lit s'effectue lorsque le lit est inoccupé. Le kit sangles Velcro doit être changé systématiquement lors du changement d'affectation de la barre de lit.
<b>CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :</b>	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. La barre latérale doit impérativement être installée à une distance soit inférieure à 60 mm de la tête de lit, soit supérieure à 318 mm de la tête de lit pour éviter tout risque d'étranglement. Le contrôle de la bonne fixation de la CANOLI au lit doit être effectué à chaque fois que le lit est refait, ou à défaut au moins 1x/semaine, par le personnel soignant. En cas de constatation de détérioration du kit de fixation, cesser immédiatement l'utilisation de la CANOLI et procéder au remplacement du kit de fixation. <b>L'UTILISATION D'UN KIT DE FIXATION DÉFECTUEUX OU NON CONFORME PEUT AVOIR DES CONSÉQUENCES IRRÉVERSIBLES.</b> Seules les sangles de fixation fournies par Alter Eco Santé sont conformes. <b>LE MONTAGE DU KIT DE FIXATION DOIT ÊTRE RÉALISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS FOURNIES PAR ALTER ECO SANTÉ. LE MONTAGE NE DOIT PAS ÊTRE RÉALISÉ SUR UN LIT NE PERMETTANT PAS D'APPLIQUER STRICTEMENT LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE.</b>
<b>HYGIÈNE ET ENTRETIEN :</b> Tous les 3 mois : nettoyage de CANOLI® et révision de la fixation de la barre de lit en soulevant le matelas et en vérifiant le bon positionnement de tous les éléments de fixation	TOUS LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits prohibés :</b> Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression. Sangles auto-agrippantes « velours » lavables à 30° ; Sangles tissu lavables à 60°, séchage à 60°.
<b>STOCKAGE :</b>	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
<b>PIÈCES D'USURES :</b>	Système d'accroche, références ZSANVELNC et ZDEBARKIT140NC.
<b>COMPOSITION :</b>	Acier, nylon. Sangle et adhésifs de marque VELCRO®
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	1 sachet contenant 1 barre latérale de redressement CANOLI®, son kit de fixation, sa fiche technique et sa notice de montage.

## FICHE TECHNIQUE

Réf	N° Identification UDI
DEBARLI90	03760311370069
DEBARCOUL90	03760311370472
DEBARCOUL90.02	03760311370465
DEBARLIDOU	03760311370441
DECLIBAR90	03760311370373
DEBARCLIDOU	03760311370540
DEHAUBAR90	03760311370342
DEBARLI140	03760311370076
DEBARLI200	03760311370458
DEBARCOUL140	03760311370519
DEBARCOUL140.02	03760311370502
DEBARCOUL200	03760311370496
DEBARCOUL200.02	03760311370489
DECLIBAR140	03760311370397
DECLIBAR200	03760311370380
DEHAUBAR140	03760311370366
DEHAUBAR200	03760311370359
DEBARSAC	03760311370434

PRODUIT :	CANOLI®
DESCRIPTION COURTE :	BARRE LATÉRALE DE REDRESSEMENT
DATE DE MISE À JOUR :	13/10/2023
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	4
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET OCCITANIE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur



Consulter notre **vidéo d'installation** de la CANOLI® - Disponible sur YouTube


Notice d'installation également disponible sur notre site internet : [www.alterecosante.net](http://www.alterecosante.net)

## NOTICE DE MONTAGE CANOLI®

**La barre latérale doit impérativement être installée à une distance soit inférieure à 60 mm de la tête de lit, soit supérieure à 318 mm de la tête de lit.**

L'emballage de la barre latérale CANOLI® contient :

- Une barre métallique ①.
- Deux sangles auto-agrippantes femelles à « velours » ② et quatre bandes adhésives auto-agrippantes mâles à « crochet » ③.
- Ou ... Deux sangles en tissu ④ à boucles rigides

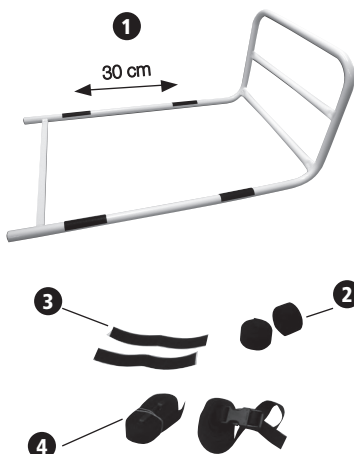

### Instructions de montage

#### Lit avec un sommier à lattes apparentes de 90 cm

- 1 • Coller les quatre bandes adhésives auto-agrippantes ③ sur la barre métallique ① aux emplacements indiqués sur le schéma ci-contre (nettoyage préalable avec un tampon légèrement alcoolisé pour assurer un collage efficace). Respecter un espacement de 30 cm.
- 2 • Si le lit est équipé d'un dossier relevable, le redresser.
- 3 • Glisser la barre métallique ① entre le relève buste et le matelas, au dessus du bassin du patient, à droite ou à gauche du lit.
- 4 • Solidariser la barre métallique en entourant le sommier avec les deux sangles « femelles » ② (fixer les extrémités des sangles « femelles » ② sur les bandes « mâles » ③).
- 5 • Après montage, vérifier le bon fonctionnement du relève buste (montée et descente).


#### Lit avec un sommier à lattes apparentes de 140 cm ou +

- 1 • Si le lit est équipé d'un dossier relevable, le redresser.
- 2 • Glisser la barre métallique ① entre le sommier et le matelas, au dessus du bassin du patient, à droite ou à gauche du lit.
- 3 • Solidariser la barre métallique en entourant le sommier avec les deux sangles tissu ④
- 4 • Après montage, vérifier le bon fonctionnement du relève buste (montée et descente).

#### Lit avec un sommier tapissier

- 1 • Glisser la barre métallique ① entre le sommier et le matelas, au dessus du bassin du patient, à droite ou à gauche du lit.
- 2 • Solidariser la barre métallique en entourant le sommier avec les deux sangles tissu ④

## COMMENT CHOISIR LA CANOLI® ADAPTÉE À VOTRE LIT ?

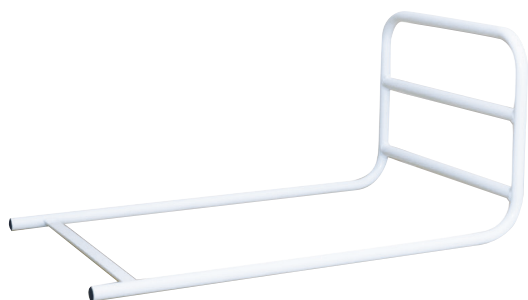

### VOTRE LIT EST UN LIT MÉDICALISÉ ?

OUI.

NON.

#### QUEL EST VOTRE TYPE DE SOMMIER ?

##### SOMMIER À LATTES APPARENTES

##### SOMMIER TAPISSIER

Largeur de 90 cm	Largeur 140 cm ou +	Largeur 90 à 140 cm	Largeur > à 140 cm
DEBARLI90 DEBARCOUL90 DEBARCOUL90.02 DEBARLIDOU DEBARCLIDOU DECLIBAR90 DEHAUBAR90	DEBARLI90 DEBARCOUL90 DEBARCOUL90.02 DEBARLIDOU DEBARCLIDOU DECLIBAR90 DEHAUBAR90	DEBARLI140 DEBARCOUL140 DEBARCOUL140.02 DECLIBAR140 DEHAUBAR140	DEBARLI200 DEBARCOUL200 DEBARCOUL200.02 DECLIBAR200 DEHAUBAR200

DEBARLI90  
 DEBARCOUL90  
 DEBARCOUL90.02  
 DEBARLIDOU  
 DEBARCLIDOU  
 DECLIBAR90  
 DEHAUBAR90