



## APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION

### "GUIDON DE TRANSFERT DÉPLAÇANT POUR ENFANTS ET PERSONNES DE PETITE TAILLE"

RÉFÉRENCE : SIDINO

Le guidon DINO® est un appareil d'aide à la verticalisation et au transfert pour les personnes ayant des difficultés motrices des membres inférieurs.

Il a été conçu pour le transfert des enfants et des personnes de petite taille.

Grâce à sa base déplaçante, solidaire d'un guidon de maintien et d'un coussin monobloc anti adduction/abduction, il permet de réaliser rapidement des transferts « assis-debout-assis » en toute sécurité avec l'aide d'un aidant.

Equipé de roulettes, DINO® permet de limiter les transferts en allant aisément de la chambre à la salle de bain sans étape intermédiaire. Son design étudié pour reproduire le schéma moteur naturel améliore la verticalisation des patients et participe ainsi à la rééducation lors de chaque transfert. Livré avec le système ISSEO® ■

## LES **+** PRODUIT

**Mât incliné** favorisant le respect du schéma moteur naturel de la verticalisation.

**Coussin monobloc** prévenant l'adduction et l'abduction, réglable en hauteur.

**Entraxe des roues optimisé** de façon à pouvoir s'insérer sous la plupart des fauteuils roulants.



© NFCA Pictures

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

You Tube

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
## SYSTEME ISSEO



Le système ISSEO® permet à l'aidant, de façon ergonomique, d'accompagner la verticalisation du patient et de le sécuriser avant et pendant le transfert.



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

[CONTACT@ALTERECOSANTE.NET](mailto:CONTACT@ALTERECOSANTE.NET) / [WWW.ALTERECOSANTE.NET](http://WWW.ALTERECOSANTE.NET)

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

## FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	DINO®
DESCRIPTION COURTE :	GUIDON DE TRANSFERT DÉPLAÇANT POUR ENFANTS ET PERSONNES DE PETITE TAILLE
RÉFÉRENCE :	SIDINO
DATE DE MISE À JOUR :	23/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370113
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	19.2 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE-ALPES AUVERGNE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux positions assises, d'un sujet présentant une incapacité de verticalisation autonome. Indiqué pour les sujets présentant une faiblesse musculaire modérée des membres inférieurs, possédant du tonus musculaire dans au moins un membre supérieur, ayant une tenue du tronc et une capacité à comprendre les consignes simples. Le guidon de transfert est destiné à évoluer sur un sol plat, régulier et sans obstacle. Procéder à un contrôle de l'intégrité de la ceinture ISSEO® avant chaque utilisation. Veiller à bien serrer au maximum les molettes de réglages en hauteur. Vérifier avant chaque utilisation que les pédales de frein soient manœuvrables et fonctionnelles. Vérifier régulièrement l'usure des roulettes afin d'en maintenir l'efficacité.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas laisser un patient seul sur le guidon DINO®. Ne pas utiliser une sangle présentant un défaut. Ne pas changer les boucles de la ceinture ISSEO®. Seules les boucles fournies par Alter Eco Santé peuvent être utilisées. Ne pas utiliser sous la douche.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits prohibés :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression. Ne pas utiliser de sèche-cheveux.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C). Ne pas exposer de façon prolongée au soleil. Ne pas exposer de façon prolongée à une température inférieure à +10°C.
PIÈCES D'USURES :	Coussin Monobloc, roulettes.
COMPOSITION :	Acier, Epoxy, Plastazote, PVC, Mat en aluminium, nylon.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant le guidon de transfert déplaçant DINO®, le système ISSEO®, sa fiche technique et sa notice de montage.
COULEUR :	Rouge.