

## SANGLE DE REHAUSSEMENT AU FAUTEUIL

RÉFÉRENCE  
SIIM428




La sangle ELINGUE® permet de positionner une personne au fond du fauteuil.

La face noire, agrippante, constitue le dessus et s'installe à l'avant de l'assise, sous cuisses.

Les sangles sont quant à elles placées sur les accoudoirs du fauteuil.

En se plaçant derrière le fauteuil, l'aidant tracte alternativement sur les poignées. Il sollicite ainsi une marche fessière passive ou semi-active facilitant alors le positionnement de l'aidé au fond de l'assise ■

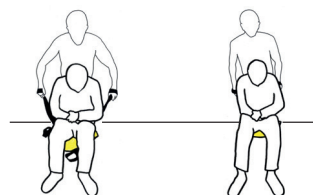

© NFCA Pictures



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

### LES **+** PRODUIT

**Seule aide technique** permettant de rehausser une personne ayant glissé dans son fauteuil.

**Sollicite une marche fessière** chez le patient.

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
Peut être utilisée pour **toutes les situations de rehaussement.**

**Confortable pour l'aidé** grâce à la mousse intérieure.

**Protège le dos de l'aidant.**



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

## FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	ELINGUE®
DESCRIPTION COURTE :	SANGLE DE REHAUSSEMENT AU FAUTEUIL
RÉFÉRENCE :	SIIM428
DATE DE MISE À JOUR :	21/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311371158
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	150 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Mobilisation manuelle par une tierce personne, pour un sujet présentant une incapacité ou des difficultés de rehaussement autonome au fauteuil.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b> <b>Après utilisation, ne pas laisser la sangle ELINGUE® sur le sol.</b> <b>Ne pas approcher d'une flamme nue ou d'une source de chaleur.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel, assouplissant et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. Lavage en machine à une température maximale de 60 °C. - Trempage en solution hospitalière détergente /désinfectante. - Séchage en machine à faible température avec programme linge délicat. - Ne pas repasser. - Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Polypropylène, nylon enduction PVC, polyester, polyester enduction PVC, jersey polyester enduction PVC.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant une sangle ELINGUE® et sa fiche technique.
COULEUR :	Vert anis et noir.
DIMENSIONS :	46 x 32 cm