

## APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION

### "GUIDON DE TRANSFERT PIVOTANT"

RÉFÉRENCES :  
SIRO / SIRO AM



**L**e guidon Giro® est un appareil d'aide au transfert pour les personnes ayant des difficultés motrices des membres inférieurs.

Grâce à sa base pivotante, solidaire d'un guidon de maintien et d'appuis tibiaux réglables en hauteur, en largeur et inclinables, il permet de réaliser rapidement un transfert assis-assis en toute sécurité avec l'aide d'un aidant.

Grâce à son design étudié pour reproduire le schéma moteur naturel GIRO® est recommandé pour les soins, la toilette, le lever, le coucher d'un patient ayant la capacité à la station debout.

Le guidon GIRO® est livré avec la sangle dorso lombaire SANGO® ■

## LES **+** PRODUIT

**Le mât incliné** du GIRO® favorise le respect du schéma moteur naturel de la verticalisation.

**Le cadre englobant** permet une stabilisation latérale, réglable en hauteur et équipé d'appuis brachiaux pour un plus grand confort.

**Les appuis tibiaux** sont inclinables pour accompagner la verticalisation, réglables en hauteur et en largeur.

**La base de 48 cm de diamètre** permet une grande stabilité lors du lever et de la rotation.



ETUDE CLINIQUE COMPARATIVE

**100% DE RÉUSSITE DE VERTICALISATION**

Pour le guidon Giro® (Tina Pro)  
82,2 % pour 2 guidons concurrents.  
Etude complète sur demande.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



## LES DIFFÉRENTES VERSIONS



**Réf SIRO AM** : Giro équipé d'un appui tibial moustache (réf SYSMOUSTAPPUI)

### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET


REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK



VOTRE CONSEILLER

# FICHE TECHNIQUE

Réf	N° Identification UDI
SIRO	03760311370243
SIRO AM	03760311370236

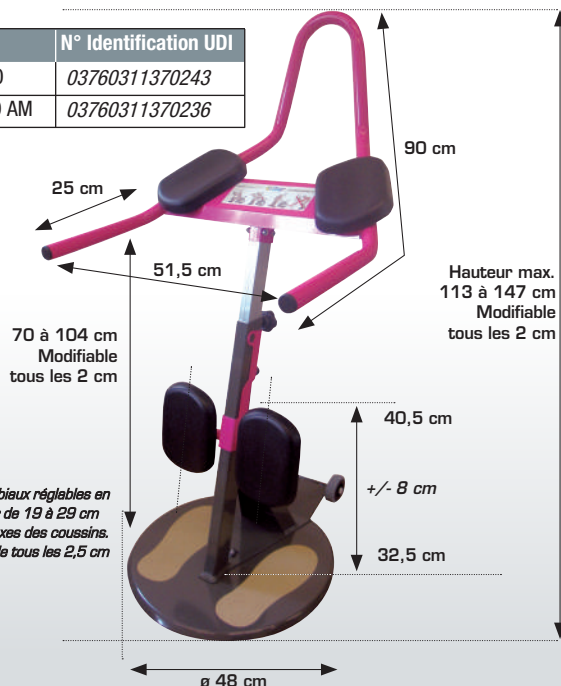

PRODUIT :	GIRO® (TINA PRO)
DESCRIPTION COURTE :	GUIDON DE TRANSFERT PIVOTANT
RÉFÉRENCES :	SIRO / SIRO AM
DATE DE MISE À JOUR :	09/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	17 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNES-ALPES AUVERGNE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

<b>INDICATIONS D'UTILISATION :</b>	<p>Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux positions assises, d'un sujet présentant une incapacité de verticalisation autonome.</p> <p>Indiqué pour les sujets présentant une faiblesse musculaire modérée des membres inférieurs, possédant du tonus musculaire dans au moins un membre supérieur, ayant une tenue du tronc et une capacité à comprendre les consignes simples.</p> <p>Doit être utilisé à plat sur une surface plane.</p>
<b>CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :</b>	<p><b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b></p> <p><b>Ne pas laisser un patient seul sur GIRO®.</b></p> <p><b>Les roulettes sont prévues uniquement pour le déplacement à vide de GIRO®.</b></p> <p><b>Vérifier régulièrement leur état.</b></p> <p><b>Ne pas utiliser les appuis brachiaux comme prise.</b></p> <p><b>Ne pas utiliser sous la douche.</b></p>
<b>HYGIÈNE ET ENTRETIEN :</b>	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p><b>Produits prohibés :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p><b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.</p> <p>Le GIRO® est équipé de roulettes avec bandages de gomme tendre qui garantissent la stabilité pour les déplacements à vide. Elles nécessitent un contrôle d'usure régulier afin d'en maintenir l'efficacité.</p> <p>En cas d'abrasion importante, de déformation, bris, etc, procéder à leur échange.</p>
<b>STOCKAGE :</b>	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
<b>PIÈCES D'USURE :</b>	<p>Appuis tibiaux et appuis brachiaux, roulettes.</p>
<b>COMPOSITION :</b>	<p>Acier S235, Acier galvanisé, nylon, PE, PA66 (galets), mousse polyuréthane.</p>
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	<p>1 carton contenant 1 guidon de transfert GIRO®, la sangle SANGO®, sa fiche technique et sa notice de montage.</p>
<b>COULEUR :</b>	<p>Rose fuchsia.</p>