

DISPOSITIF DE TRANSFERT ET D'AIDE À LA TOILETTE


RÉFÉRENCE : SILO

Le dispositif de transfert et d'aide à la toilette MILO® est un outil de soins « 3 en 1 ». Polyvalent, il permet la verticalisation et le transfert d'un patient vers le fauteuil et le lit, son passage aux toilettes et à la douche. La structure du MILO® est conçue pour passer sur les cuvettes de WC de hauteur standard. Il est également doté d'un pot amovible pour répondre à des situations d'urgence.

Entièrement composé de matériaux pouvant aller sous l'eau, le MILO® permet à son utilisateur d'être assis ou debout à la douche. En position debout, la toilette intime complète est facilitée.

Ses appuis tibiaux sont réversibles pour les soins de pieds. Ses roues adaptées et ses nombreuses prises permettent une grande maniabilité dans des endroits exigus pour le soignant.

Développé par une équipe pluridisciplinaire de soignants, d'experts en sécurité du travail et de designers industriels, le MILO® diminue le nombre de mobilisations ■

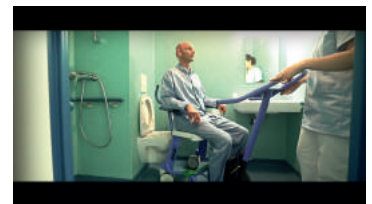

© NFCA Pictures

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

LES + PRODUIT

Favorise l'entretien de l'autonomie et le maintien de la continence.

Optimise le temps de prise en soin du patient par le soignant.

Permet une douche debout.

OPTIONS

SANGLE BORA



Sangle abdominale de maintien.
Réf : SIBORA - Taille 38 à 60

COUSSIN D'ASSISE



Coussin adapté pour l'assise du MILO®
Réf : SI21636

TRÈFLE



Cale de rehaussement de 9 cm
Réf : SIIM2001

CROCHET



Crochet pour MILO® et sa visserie. Réf : ZMILCRONC

ISSEO



Ceinture et échelle pour guidon déplaçant. Réf : SYSSEO

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET


REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 



VOTRE CONSEILLER

Réf	N° Identification UDI
SIBORA	03760311371707
SI21636	03760311371714
ZMILCRONC	En cours d'obtention

FICHE TECHNIQUE

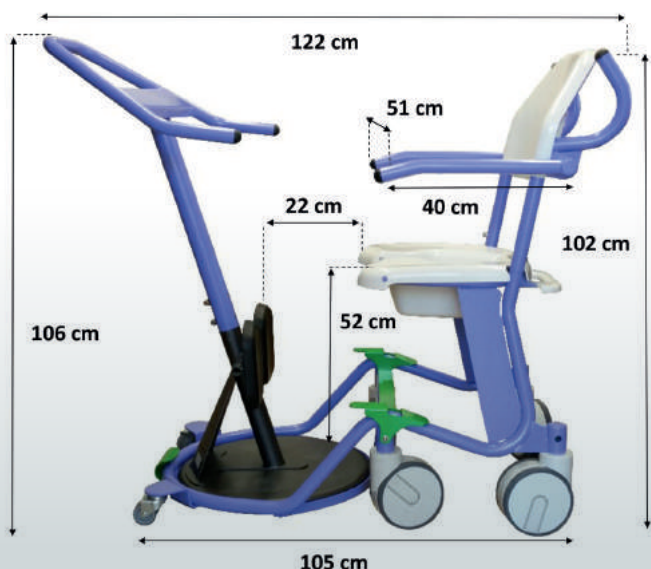

PRODUIT :	MILO®
DESCRIPTION COURTE :	DISPOSITIF DE TRANSFERT ET D'AIDE À LA TOILETTE
RÉFÉRENCE :	SILO
DATE DE MISE À JOUR :	02/03/2020
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370250
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	39 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE-ALPES AUVERGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manipulation à 1 soignant si sujet < 90 kg. Manipulation à 2 soignants si sujet > 90 kg.</p> <p>Assoir le sujet avant tout déplacement de MILO®. Actionner impérativement les freins lorsque le sujet est debout ou en phase de transfert pour accéder ou descendre de MILO®</p> <p>Retirer le pot avant passage sous la douche ou sur les WC.</p> <p>Respecter les préconisations de la fiche d'entretien.</p> <p>Doit être utilisé sur sol plat et régulier, sans obstacles.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Ne pas laisser un patient seul en position debout sur le dispositif.</p> <p>Ne pas utiliser un matériel non conforme.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.</p> <p>Les roulettes nécessitent un contrôle d'usure régulier afin d'en maintenir l'efficacité. En cas d'abrasion importante, de déformation, bris etc, procéder à leur échange.</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p> <p>MILO® doit être stocké en tournant la barre d'appui vers l'assise pour réduire son encombrement à vide.</p>
PIÈCES D'USURES :	Appui tibiaux, roulettes, accoudoirs.
COMPOSITION :	Châssis en acier inoxydable, peinture époxy. Assise, dossier, pot et protection des talons en ABS. Roulettes acier et PVC.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant le 1 dispositif MILO®, sa fiche technique et sa notice de montage.
COULEUR :	Bleu lavande, blanc.