

## COUSSIN DE REHAUSSEMENT UNIDIRECTIONNEL

RÉFÉRENCES :  
SIIM39G / SIIM38G

Le coussin de rehaussement unidirectionnel ONE-WAY® est conçu pour l'installation et le maintien du patient assis au fauteuil.

Ce coussin glisse à sens unique, mais agit en deux temps.

Lors de l'installation, ONE-WAY® coulisse avec la personne vers le fond de l'assise, puis l'empêche de glisser vers l'avant.

Ainsi le maintien en position physiologique est facilité, l'affaissement dans le fauteuil est évité.

Il peut être utilisé sur des coussins de prévention d'escarres ■



© NFCA Pictures



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

## LES + PRODUIT

Le coussin ONE-WAY® convient à tous les poids et à tous les supports.

L'assise permet un confort optimal pour le patient.

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
Agit comme un frein antichute en limitant la glisse passive.

Composé de 6 tissus, il ne plisse pas sous l'utilisateur.

Lavable à 80 °C.



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions
SIIM39G N° Identification UDI : 5708012126934	Coussin ONE-WAY® M	37 x 43 cm
SIIM38G N° Identification UDI : 05708012149254	Coussin ONE-WAY® L	45 x 45 cm



PRODUIT :	ONE-WAY®
DESCRIPTION COURTE :	COUSSIN DE REHAUSSEMENT UNIDIRECTIONNEL
RÉFÉRENCES :	VOIR TABLEAU REF
DATE DE MISE À JOUR :	17/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	300 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

<b>INDICATIONS D'UTILISATION :</b>	Indiqué pour les sujets présentant des difficultés de rehaussement en position assise et sujet à un affaissement dans le fauteuil. Lors de l'installation sur l'assise, la flèche doit être visible et en direction du dossier. Considérant que le patient ne s'assoit pas directement au fond de l'assise, placer le coussin ONE-WAY® à 10 cm du bas du dossier de manière à ce qu'une fois le rehaussement effectué, le patient et le coussin ONE-WAY® occupent la totalité de l'assise. Peut-être positionné sur des coussins préventifs mais pas sur des coussins curatifs pour les escarres.
<b>CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :</b>	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b>
<b>HYGIÈNE ET ENTRETIEN :</b>	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage – désinfection et de comptabilité tissus » mis au point par la société ANIOS. <b>Produits prohibés :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. <b>Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage à 80° en machine.</li> <li>• Séchage à 60° maximum.</li> <li>• Lavage à la main, trempage et essuyage.</li> <li>• Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).</li> </ul>
<b>STOCKAGE :</b>	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
<b>COMPOSITION :</b>	Nylon contre laqué 160° avec enduction polyuréthane et velours, nylon antidérapant.
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	1 sachet contenant le coussin de rehaussement unidirectionnel ONE-WAY® et sa fiche technique.
<b>COULEUR :</b>	Noir.