

PIEDS DE REHAUSSEMENT RÉGLABLES

RÉFÉRENCE
SUN46560



Les pieds de rehaussement PAT'DEPH6® sont conçus pour surélever les chaises, les lits, les tables etc... Ils s'adaptent sur des pieds de 7,7 cm de diamètre maximum.

Les 6 positions de réglages de PAT'DEPH6® permettent de surélever de 8,4 cm à 13,5 cm.

Dotés d'une base large et robuste, les pieds du meuble à rehausser sont ainsi maintenus dans la partie supérieure du rehausseur ■

LES PRODUIT

Un seul produit : 6 positions de réglages pour un rehaussement plus ou moins important.

Base large et robuste offrant une grande stabilité.

Simple d'installation.

Utilisable avec des pieds **ronds ou carrés.**

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


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ — 31270 VILLENEUVE TOLOSANE — FRANCE
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

Position	Hauteur de rehaussement
1	8,38 cm
2	9,39 cm
3	10,41 cm
4	11,43 cm
5	12,44 cm
6	13,46 cm



Les positions X ne peuvent pas être utilisées.



PRODUIT :	PAT'DEPH6®
DESCRIPTION COURTE :	PIEDS DE REHAUSSEMENT RÉGLABLES
RÉFÉRENCE :	SUN46560
DATE DE MISE À JOUR :	27/11/2019
CLASSE DE DISPOSITIF :	NON APPLICABLE
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	04250629319748
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	215 G PAR PIED
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	135 KG PAR PIED
FABRICANT :	SUNDO
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Vérifier que chaque pied du meuble est bien centré sur son rehausseur. Les 4 pieds doivent impérativement être réglés à la même hauteur avant toute utilisation. N'utiliser qu'en mode fixe et vérifier l'adhérence au sol. Tester la stabilité avant utilisation du meuble par le sujet. Aligner la flèche sur le carré de réglage avec la position souhaitée sur le corps du rehausseur (de 1 à 6).
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas utiliser si le pied de meuble ne rentre pas entièrement dans le rehausseur. Ne pas utiliser un produit fendu ou cassé. Ne pas utiliser sur un sol non plat.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Polypropylène.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 jeu de 4 rehausseurs PAT'DEPH6® et la fiche technique.
COULEUR :	Marron.
DIMENSIONS :	Diamètre inférieur : 17,8 cm. Diamètre supérieur : 12,1 cm. Hauteur totale du dispositif : 13 à 16 cm.