

## PROTECTION DE BARRIÈRES DE LIT

### RÉFÉRENCES :

PBL 140 / PBL 190 / PBL 100



Les protections de barrières de lit protègent le patient alité des parties dures et contondantes des barrières de lit.

Elles sont adaptables sur la plupart des barrières de lit connues sur le marché.

Leurs 4 sangles munies de boucles à fermeture automatique permettent d'installer les protections de barrières de lit de façon très simple et rapide.

La housse en polyuréthane est ignifuge, imperméable, respirante, antibactérienne et offre une surface douce au toucher.

Facilement amovible grâce à ses sangles, elles se positionnent à l'extérieur du lit pour baisser la barrière.

Existe aussi en version demie-barrière. (2 sangles ajustables)

## LES PRODUIT

**Rapide et simple d'installation.**

**Se tournent aisément sur les barrières de lit pour un meilleur accès au lit.**

**Sa grande fermeture à glissière permet un entretien rapide.**

**Résistance au feu : ISO-12952-Classe A**  
(Standard UNE-EN14533:2003)

© NFCA Pictures

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


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**  
7 IMPASSE PRADIÉ — 31270 VILLENEUVE TOLOSANE — FRANCE  
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65  
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions	Densité de mousse	Poids
PBL140 <i>N° Identification UDI : 03760311371080</i>	Protection de barrières de lit matelassée déhoussable M (la paire)	136 x 33 x 3 cm	25 kg/m <sup>3</sup>	0,750 kg
PBL190 <i>N° Identification UDI : 03760311371073</i>	Protection de barrières de lit matelassée déhoussable L (la paire)	186 x 33 x 3 cm	25 kg/m <sup>3</sup>	1 kg
PBL100 <i>N° Identification UDI : En cours d'obtention</i>	Protection de barrières de lit matelassée déhoussable S (la paire)	100 x 33 x 3 cm	25 kg/m <sup>3</sup>	0,5 kg

PRODUIT :	PROTECTION DE BARRIÈRES DE LIT
DESCRIPTION COURTE :	/
RÉFÉRENCES :	PBL140 / PBL190 / PBL 100
DATE DE MISE À JOUR :	29/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	<i>VOIR TABLEAU REF</i>
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	3
POIDS :	<i>VOIR TABLEAU REF</i>
DENSITÉ DE LA MOUSSE :	25 KG/M <sup>3</sup>
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Avant utilisation, vérifier que les fermetures à glissières des housses sont fermées. Les sangles doivent être positionnées et tendues sur le côté extérieur de la barrière de lit. Indiqué pour les sujets alités et agités.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b> <b>Ne pas laisser au sol après utilisation.</b> <b>Résistance au feu : ISO-12952-Classe A (Standard UNE-EN14533:2003).</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes ou eau savonneuse. Lavage des housses uniquement. Les housses doivent être désolidarisées des mousses pour être lavées. Pas de jet sous pression. Housse lavable à 95°C et autoclavable à 120-130°C.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Mousse de polyéthylène. Housse en polyuréthane.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant une paire de protection de barrières de lit et sa fiche technique.
COULEUR :	Bleu.