

CEINTURE POUR VERSO®

RÉFÉRENCE : SYSTCALEO



Le système de sangle TCALEO® peut être utilisé seul ou avec le guidon déplaçant VERSO®.

Utilisée seule, TCALEO® se place autour des épaules du patient, et permet de fournir une aide pour passer de la position couchée à la position assise, à 1 ou 2 soignants. Les sangles offrent de multiples prises pour assurer la meilleure position au soignant par rapport au patient.

TCALEO® permet de sécuriser et de stabiliser un patient utilisant le guidon déplaçant VERSO®. Elle permet de maintenir la station debout pendant la phase de transfert ou de change. Grâce à ses systèmes de sangles, il est facile de trouver le bon ajustement sur la barre d'appui de VERSO®.

Son installation est simple et rapide, puisqu'il suffit d'enfiler les sangles au cran voulu sur le haut de chaque bras de la barre d'appui de VERSO®. ■

LES PRODUIT

Installation simple et rapide.

Double utilisation : seule ou avec le guidon VERSO®.

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
VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



CE

VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



| | |
|------------------------------|----------------------|
| PRODUIT : | TCALEO® |
| DESCRIPTION COURTE : | CEINTURE POUR VERSO® |
| RÉFÉRENCE : | SYSTCALEO |
| DATE DE MISE À JOUR : | 08/02/2019 |
| CLASSE DE DISPOSITIF : | CLASSE 1 |
| GARANTIE* : | 2 ANS |
| N° D'IDENTIFICATION UDI : | 03760311370120 |
| GÉNÉRATION DE PRODUIT : | 2 |
| POIDS : | 150 G |
| CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE : | 130 KG |
| TAILLE : | 156 X 23 CM |
| FABRICANT : | ALTER ECO SANTÉ |
| ORIGINE : | FRANCE |

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

| | |
|----------------------------------|---|
| INDICATIONS D'UTILISATION : | Peut être utilisée seule ou avec le guidon déplaçant VERSO®. Manutention manuelle par une tierce personne pour aider et sécuriser les transferts, maintenir la station debout pendant la phase de change ou de transfert, fournir une aide pour passer de la position couchée à la position assise lorsqu'elle est placée autour des épaules du sujet. |
| CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ : | Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, la ceinture TCALEO® ne doit pas rester au sol. TCALEO® n'est compatible qu'avec le guidon VERSO®. |
| HYGIÈNE ET ENTRETIEN : | Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Essuyage à l'éponge et au savon doux. Ne pas repasser. Blanchisserie interdite. |
| STOCKAGE : | Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C). |
| COMPOSITION : | Toile Ripstop nylon, enduction polyuréthane, haute ténacité. Vinyle URBAN M1 imperméable traité MRSA contre les bactéries, résistance à l'abrasion 100000 cycles. Une mousse de 1 cm d'épaisseur assure le confort de la sangle. Sans solvants ni phtalates. |
| CONDITIONNEMENT : | 1 sachet contenant la ceinture TCALEO® et sa fiche technique. |
| COULEUR : | Noir et vert anis. |
| DIMENSIONS : | Assise : 70 x 23 cm. Sangles : 43 x 4 cm. Pas des sangles : 7 cm. |