

## MATELAS DE TRANSFERT

### RÉFÉRENCES :

SI21600 / SI21650N / SI21700

**S**également conçu pour faciliter le travail des soignants, le matelas TRANSALT® est constitué d'une face glissante, côté brancard, et d'une face capitonnée, côté patient.

Associé à un brancard, il apporte du confort au patient et permet une translation en toute sécurité. Les soignants déplacent le patient, d'un brancard à un plan horizontal, allongé sur le matelas en tractant les poignées.

Le TRANSALT® existe en trois versions : rigide, semi-rigide et souple. Le modèle souple est utilisable dans un matelas coquille, il se roule et s'intègre parfaitement à l'équipement des ambulances de type B.

Le TRANSALT® est radiotransparent et amagnétique ■




### TEST CLINIQUE

#### LE TRANSALT® ET LA PRÉVENTION D'ESCARRES

UN TEST CLINIQUE A ÉTÉ MENÉ AU CHU DE NÎMES DANS DES CONDITIONS DE BRANCARDAGE EN DÉCUBITUS DORSAL STRICT, PUIS AVEC UN DOSSIER INCLINÉ À 30°.

DANS LES DEUX CAS, LES RÉSULTATS DÉMONTRENT LA MOINDRE PRESSION D'INTERFACE DES VERTÈBRES SACRÉES AVEC LE MATELAS SOUPLE TRANSALT®, QUI RÉDUIT DONC SIGNIFICATIVEMENT LE RISQUE D'ESCARRES.

(ETUDE DISPONIBLE SUR DEMANDE)

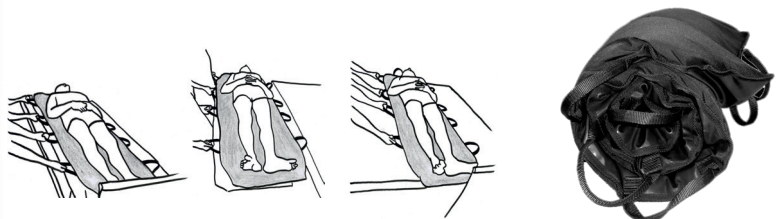

TRANSALT® souple



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

## LES + PRODUIT

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
TRANSALT® est **radiotransparent** et **amagnétique**.

Les 12 poignées de traction **résistent à des tractions de 600 kg.**

Le modèle rigide est **adapté aux polytraumatisés.**



VOTRE CONSEILLER



### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE

Réf.	Désignation	Dim.	Poids	Charge max.
SI21600 N° Identification UDI : 03760311371004	Matelas de transfert TRANSALT® rigide. Non feu	190 x 60 x 5 cm	4 kg	130 kg
SI21650N N° Identification UDI : 03760311370922	Matelas de transfert TRANSALT® semi-rigide. Non feu	190 x 60 x 5 cm	3 kg	130 kg
SI21700 N° Identification UDI : 03760311370908	Matelas de transfert souple TRANSALT® Non feu	190 x 60 x 5 cm	4 kg	130 kg

PRODUIT :	TRANSALT®
DESCRIPTION COURTE :	MATELAS DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SI2 1600 SI2 1650N SI2 1700
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE-ALPES AUVERGNE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

<b>INDICATIONS D'UTILISATION :</b>	<p>Manutention manuelle par une tierce personne, pour un transfert allongé, d'un sujet présentant une incapacité de bouger ou lors de la prise en charge au service des urgences, jusque dans les services d'imagerie.</p> <p>La face adhérente étiquetée DESSUS doit être côté patient et la face glissante côté brancard.</p> <p>Possibilité de positionner une alèse entre le brancard et le matelas de transfert TRANSALT® pour éviter un effet « ventouse ».</p>
<b>CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :</b>	<p><b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b></p> <p><b>Après utilisation, le matelas de transfert TRANSALT® ne doit pas rester sur le sol.</b></p> <p><b>Ne pas utiliser un produit abîmé ou défectueux.</b></p> <p><b>Ne pas plier le matelas de transfert TRANSALT® SI21600 de plus de 30°.</b></p>
<b>HYGIÈNE ET ENTRETIEN :</b>	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p><b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p><b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes par trempage ou aspersion.</p>
<b>STOCKAGE :</b>	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
<b>COMPOSITION :</b>	<p>SI21600 : Dessus : Dickson, Dessous : Risptop, Intérieur : avec plaque et mousse.</p> <p>SI21650N : Dessus : Dickson, Dessous : Risptop, Intérieur : GA456, PB et mousse.</p> <p>SI21700 : Dessus : Bachette M2, Dessous : Cordura M1, Intérieur : Sans plaque (+sangle roulage)</p>
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	<p>1 carton contenant le matelas de transfert TRANSALT® et sa fiche technique.</p>
<b>COULEUR :</b>	<p>Noir</p>