

## MATELAS DE TRANSFERT ÉTANCHE

### RÉFÉRENCES

SI21750AD / SI21750G

**S**également conçu pour faciliter le travail des personnels d'intervention et des soignants des services médico techniques, le matelas TRANSALTO® est munie de 12 poignées ergonomiques.

Il est constitué d'une face orange, côté brancard, et d'une face bleue capitonnée, côté patient. Associé à un brancard, il apporte du confort au patient et permet une translation en toute sécurité.

Les soignants déplacent le patient allongé sur le matelas en tractant sur les poignées. Le TRANSALTO® ne comporte aucune couture pour une désinfection rapide et totale.

Le TRANSALTO® existe en deux versions :

- L'une, avec le dessus antidérapant, évite au patient de glisser en position semi allongée SI21750AD.
- La seconde avec le dessus glissant, facilite la dépose du patient du TRANSALTO® SI21750G.

Le TRANSALTO® est radiotransparent et amagnétique ■



## LES PRODUIT

TRANSALTO® est étanche, radiotransparent et amagnétique.

Les 12 poignées de traction résistent à des tractions de 600 kg.

TRANSALTO® permet l'utilisation des relèves-bustes.

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


VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

You 



VOTRE CONSEILLER



### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE



Réf.	Désignation
SI21750AD N° Identification UDI : 03760311370786	Matelas de transfert TRANSALTO® Semi-Rigide Dessus Antidérapant
SI21750G N° Identification UDI : 03760311370779	Matelas de transfert TRANSALTO® Semi-Rigide Dessus Glissant

PRODUIT :	TRANSALTO®
DESCRIPTION COURTE :	MATELAS DE TRANSFERT ÉTANCHE
RÉFÉRENCE :	SI21750AD – SI21750G
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	3,9 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE-ALPES AUVERGNE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

<b>INDICATIONS D'UTILISATION :</b>	<p>Manutention manuelle par une tierce personne, pour un transfert allongé, d'un sujet présentant une incapacité de bouger ou lors de la prise en charge au service des urgences, jusque dans les services d'imagerie.</p> <p>Pour la manutention de patients de plus de 90 kg, il est préférable d'utiliser un drap de transfert ou de rehaussement. La traction par deux opérateurs est recommandée.</p> <p>Il est recommandé de couvrir le brancard d'un drap en coton pour supprimer tout risque d'adhérence avec le produit.</p>
<b>CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :</b>	<p><b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b></p> <p><b>Après utilisation, le matelas de transfert TRANSALTO® ne doit pas rester sur le sol.</b></p>
<b>HYGIÈNE ET ENTRETIEN :</b>	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p><b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p><b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes par vaporisation et essuyage.</p> <p>Les surfaces sont étudiées pour laisser le moins d'angles inaccessibles possible.</p> <p>Il peut être lavé à l'éponge et à l'eau savonneuse tiède, puis essuyé à la raclette.</p> <p>Ne pas laver en machine ou en autoclave.</p> <p>Ne pas sécher en machine.</p> <p>Ne pas repasser.</p>
<b>STOCKAGE :</b>	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
<b>COMPOSITION :</b>	<p>Enveloppe : toile polyester enduite 100% PVC.</p> <p>Garniture : Mousse polyéthylène densité 33kg/m3, Mousse polyéthylène densité 39kg/m3. Jonc : PE.</p>
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	<p>1 carton contenant le matelas de transfert TRANSALTO® et sa fiche technique.</p>
<b>COULEUR :</b>	<p>Côté brancard orange, côté patient bleu.</p>
<b>DIMENSIONS :</b>	<p>76 x 200 x épaisseur 4 cm.</p>