

DISQUE DE TRANSFERT PIVOTANT

RÉFÉRENCE
SIECA611380NC

TURNPLATE® est un disque de transfert pivotant. Grâce à ses faces extérieures antidérapantes et étanches, TURNPLATE® permet d'accompagner facilement un patient lors d'un transfert entre deux assises par rotation sur le disque.

Ce disque rigide et incassable peut être posé sur tous types de sols intérieurs et extérieurs ainsi qu'en zone humide ■



LES **+** PRODUIT

Peut être utilisé pour un transfert assisté.
Facilement transportable grâce aux poignées.

OPTIONS

OLIVIA



Peut être associé à une sangle de transfert (OLIVIA® par exemple) et au coussin anti abduction/adduction MOUSTACHE®.

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
MOUSTACHE



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE


7 IMPASSE PRADIÉ - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE - FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

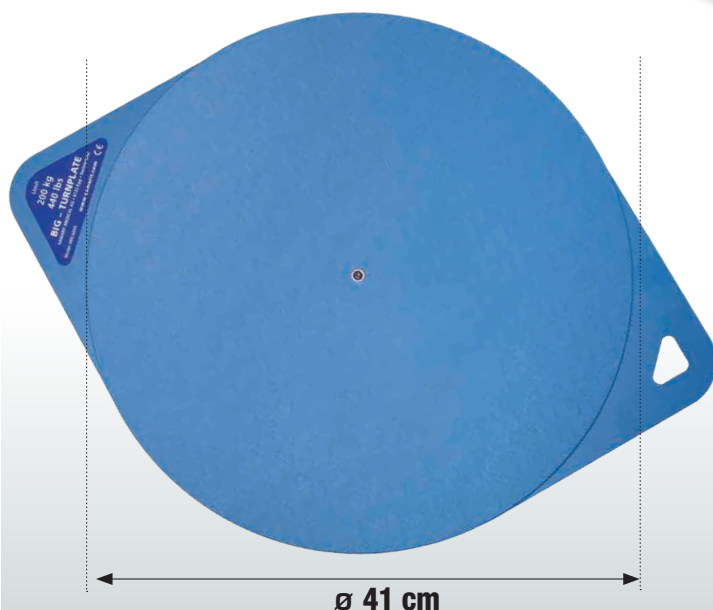

PRODUIT :	TURNPLATE®
DESCRIPTION COURTE :	DISQUE DE TRANSFERT PIVOTANT RIGIDE
RÉFÉRENCE :	SIECA611380NC
DATE DE MISE À JOUR :	07/02/2020
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	800 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	SAMARIT
ORIGINE :	SUISSE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux plans de transfert, d'un sujet présentant une incapacité de piétinement.</p> <p>Peut être utilisé pour un transfert assisté si l'usage de ce produit est adapté au patient.</p> <p>S'utilise sur tous les types de sols intérieurs et extérieurs.</p> <p>En zone humide, vérifier l'adhérence au sol.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Ne jamais séparer les deux faces du disque.</p> <p>Après utilisation, le disque de transfert TURNPLATE® ne doit pas rester sur le sol.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS</p> <p>Produits prohibés : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Les surfaces extérieures peuvent être brossées ou essuyées.</p> <p>Ne pas laver en machine ou immerger. En cas d'immersion, faire sécher à plat.</p> <p>Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>PVC, Teflon.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 sachet contenant le disque de transfert pivotant TURNPLATE® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Bleu.</p>