

## MATELAS DE TRANSFERT

### RÉFÉRENCES

SIIM4317 / SIIM4318 / SIIM8150190 / SIIM8070190  
SIIM4048 / SIIM4049 / SIIM4047

Le matelas de transfert TWO MOVE® est constitué d'un plan souple confortable entouré d'une housse cou-lissante amovible. Il permet à un ou deux soignants de transférer un patient allongé en le faisant glisser dessus. Comme par exemple : du lit au brancard, du lit au chariot-douche, du brancard à la table radio, à l'IRM... Léger et facile à transporter, le TWO MOVE® offre une grande maniabilité au soignant.

La planche avec un traitement antibactérien et la housse amovible imperméable garantissent une capacité de désinfection totale et immédiate.

Le TWO MOVE® existe en plusieurs formats adaptés à toutes les situations de transfert : pliant, non pliant, court, long, large et extra-large pour les patients à forte charge pondérale.

**Le TWO MOVE® est radiotransparent et amagnétique ■**



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

## LES + PRODUIT

TWO MOVE® est radiotransparent et amagnétique.

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
Matière plus souple permettant un meilleur confort pour le patient.

Housse amovible.

La planche TWO MOVE® est très légère.



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**  
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE  
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65  
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions	Poids
SIIM4318 N° Identification UDI : 05708012003198	Matelas de transfert TWO-MOVE® pliant	50 x 190 cm	1,1 kg
SIIM8150190 N° Identification UDI : 05708012003235	Matelas de transfert TWO-MOVE® non pliant	50 x 190 cm	1,1 kg
SIIM4317 N° Identification UDI : 05708012003204	Matelas de transfert TWO-MOVE® court	50 x 95 cm	0,6 kg
SIIM8070190 N° Identification UDI : 05708012003242	Matelas de transfert TWO-MOVE® XL pliant	70 x 190 cm	1,8 kg
SIIM4048 N° Identification UDI : 05708012003143	Housse de rechange matelas TWO-MOVE®	51,5 x 161,5 cm	
SIIM4049 N° Identification UDI : 05708012003150	Housse de rechange matelas TWO-MOVE® XL	71,5 x 161,5 cm	
SIIM4047 N° Identification UDI : 05708012003136	Housse de rechange matelas TWO-MOVE® court	79 x 50 cm	

PRODUIT :	TWO MOVE®
DESCRIPTION COURTE :	MATELAS DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIIM4317 SIIM4318 SIIM8150190 SIIM8070190 SIIM4048 SIIM4049 SIIM4047
DATE DE MISE À JOUR :	30/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG À UNE DISTANCE < 30 CM 300 KG À UNE DISTANCE < 10 CM
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

<b>INDICATIONS D'UTILISATION :</b>	<p>Manutention manuelle par une tierce personne, pour un transfert allongé, d'un sujet présentant une incapacité de bouger ou lors de la prise en charge au service des urgences, dans les services d'imagerie et les services de soin.</p> <p>Les transferts doivent être effectués entre deux plans horizontaux avec un dénivelé ou espacement inférieur à 15 cm. La translation peut se faire à une ou deux personnes.</p>
<b>CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :</b>	<p><b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b></p> <p><b>Après utilisation, le matelas de transfert TWO MOVE® ne doit pas rester sur le sol.</b></p>
<b>HYGIÈNE ET ENTRETIEN :</b>	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu et surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p><b>Produits interdits :</b> Solvants, bases acides, eau de javel, chlore, adoucissant et produits abrasifs.</p> <p><b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Entretien de la planche : Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).</p> <p>Entretien de la housse :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage à 80° en machine. Séchage à 60° maximum. Autoclave à 136°.</li> <li>• Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air) de PH neutre.</li> <li>• Lavage à la main, trempage et essuyage.</li> </ul>
<b>STOCKAGE :</b>	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
<b>COMPOSITION :</b>	<p>Planche : Plastazote / Housse : Nylon avec enduction PU, silicone.</p>
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	<p>1 carton contenant le matelas de transfert TWO MOVE® et sa housse, sa notice de montage et sa fiche technique.</p>
<b>COULEUR :</b>	<p>Planche : noire. Housse : verte.</p>